


# EMU-GRAPH 7

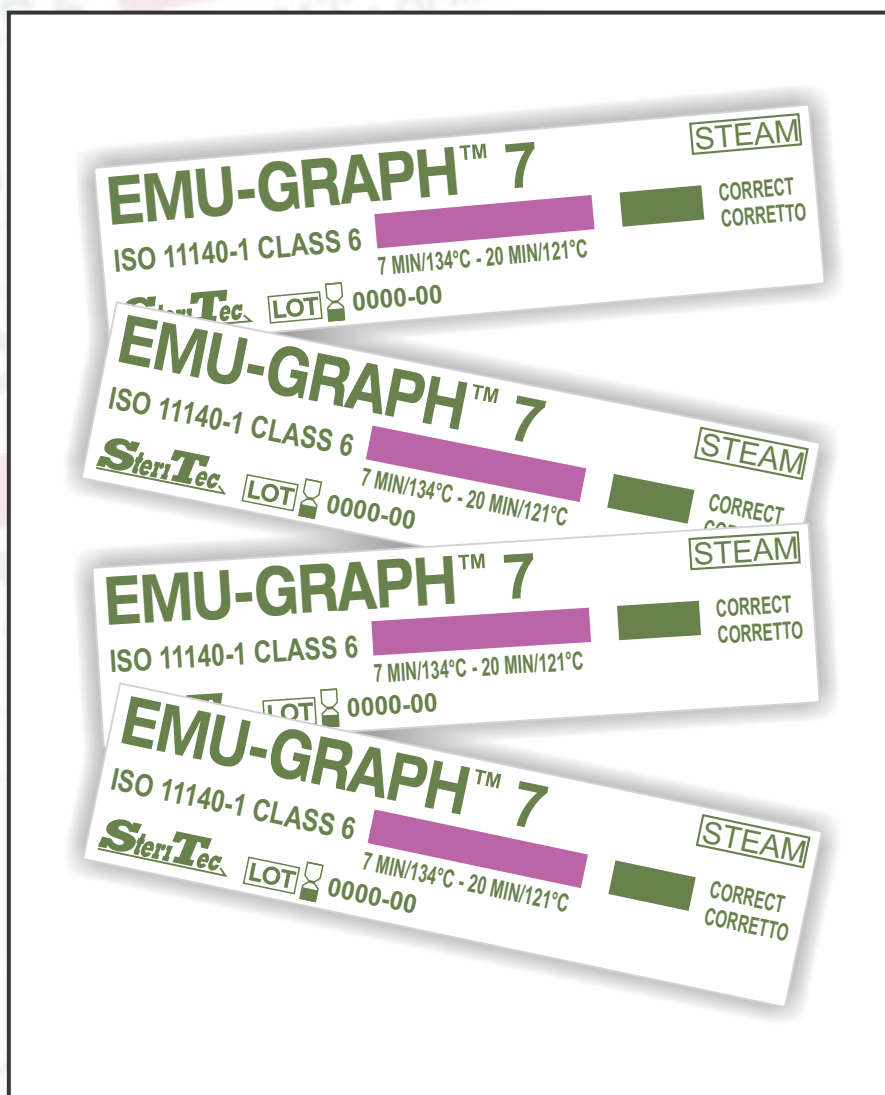

## Emu-Graph 7

### Emulador Químico

**Código: CI 142**

- Mudança de cor nítida de púrpura para verde

Monitor de ciclo completo de esterilizante específico, ou seja, deve conter vapor para que a mudança de cor ocorra

- Livre de chumbo e metais pesados tóxicos

- Características especiais

Fornecer uma resposta integrada para esterilização a vapor em autoclaves operando a 134°C por 7 minutos ou 121°C por 20 minutos

- ANSI/AAMI/ISO 11140-1, classe 6

#### INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM #	EMBALAGEM
CI 142	PACOTE COM 250 UNIDADES

**SteriTec**



Importador para o Brasil

**SteriControl**

"Os nossos clientes sabem a diferença!"

[sac@stericontrol.com.br](mailto:sac@stericontrol.com.br)

# EMU-GRAPH 7

## Folha de Dados Técnicos



### Descrição:

O **Emu-Graph 7** da SteriTec é um emulador químico classe 6, projetado para uma resposta integrada a todos os parâmetros críticos de esterilização por vapor em autoclaves com pré-vácuo que operam a 134°C por 7 minutos ou a 121°C por 20 minutos de exposição direta. Proporciona uma confirmação visual das condições de esterilização ou não, no interior dos pacotes ou caixas, dentro da câmara do esterilizador.

### Características de desempenho:

O **Emu-Graph 7** tem uma barra indicadora que muda de cor quando exposto as condições de esterilização por vapor.

**Mudança de cor:** Púrpura para Verde.

### Tempo de Mudança de Cor ao atingir os parâmetros críticos:

<i>Em uma autoclave a vapor normal hospitalar.</i>	
<b>7 minutos ou mais a 134°C (+/- 1°C)</b>	<b>20 minutos ou mais a 121°C (+/- 1°C)</b>
<i>Valor Declarado: Como determinado em um resistômetro (BIER VESSEL).</i>	
<b>7,5 minutos (+0/-22 seg.) a 134°C (+0/- 1°C)</b>	<b>18,5 minutos (+0/-1.2 min.) a 121°C (+0/- 1°C)</b>

**Estabilidade do indicador:** Antes ou depois da esterilização = Excelente

### Instruções para uso

Coloque uma tira do emulador **Emu-Graph 7** em cada pacote ou caixa a esterilizar.

Processe como sempre.

Após o ciclo de esterilização, verifique visualmente se a barra de tinta do indicador mudou completamente da cor púrpura para verde. Compare as mudanças de cor da tinta com o guia de interpretação impresso no fim da tira, podendo haver variações de tonalidades de verde escuro a claro. Se a barra **não mudar para verde**, é uma indicação de condições inadequadas de esterilização.

Se o **Emu-Graph 7** evidenciar condições inadequadas de esterilização, o material deve ser reprocessado com novas tiras indicadoras. Se existir qualquer dúvida sobre a esterilidade do artigo, este **não** deve ser considerado estéril.

### PRECAUÇÃO:

Não use uma tira cuja barra indicadora não seja de cor púrpura antes da exposição ao processo de esterilização a vapor.

### Características físicas:

**Laminação:** Frente e Verso.

**Dimensões:** 7.6cm X 1.9cm

### Limitações ambientais:

Armazenamento, validade e número do lote estão impressos em cada embalagem.

### Classificações de normas:

ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, Classe 6

**Registro no MS.** Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme RDC 185/2001 - ANVISA

Form No.: DF-109 Rev.: G

#### IMPORTADOR OFICIAL PARA O BRASIL:

Stericontrol Comercial Hospitalar Ltda.  
Tel/fax: (43) 3348-1516 - sac@stericontrol.com.br  
www.stericontrol.com.br

#### DISTRIBUIDOR LOCAL: